

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ CLEAR™330

Модель C3-FS RIC/RITE Ресивер в слуховом проходе/ Ресивер в ухе



ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX CLEAR™330

(заполняется специалистом по слуховым аппаратам)

Дата:_____

Размер батарейки: _____



СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ4	
СЛУХОВОЙ АППАРАТ5	
Распознавание правого/левого аппарата	
Звуковые предупреждения 8	
Батарейка	
Предупреждение о разряде батарейки	
Включение и выключение слухового аппарата 13	
Регулировка громкости14	
предупреждение о прерывании связи	
Программы прослушивания	
Выбор программ прослушивания20	
Zen+21	
Разговор по телефону	
Как расположить слуховой аппарата в ухе 23	
Извлечение слухового аппарата из уха 24	
Чистка25	
АКСЕССУАРЫ27	
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ28	
УХОД ЗА СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ31	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ32	
РЕКОМЕНДАЦИИ35	
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

СИМВОЛЫ

Далее будут использованы следующие символы:



Сообщения под этим заголовком информируют о негативных воздействиях, потенциальных угрозах безопасности и неадекватной работе устройства.



Сообщения под этим заголовком информируют о том, что надо проявить особое внимание к СА.




Подлежит особой утилизации.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ

На рисунке ниже показан слуховой аппарат без модуля ушного вкладыша. Выбор модуля ушного вкладыша определяется индивидуальными требованиями клиента. Пожалуйста, обратитесь к руководству по использованию модуля ушного вкладыша.

- 1 Переключатель on/off
- 2 Батарейный отсек с зацепом для ногтя
- 3 Программная кнопка
- 4 LED и ID для правого/левого CA

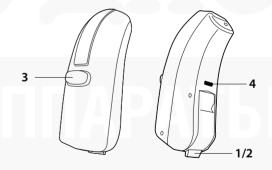

ПРИМЕЧАНИЕ

Помимо инструкций для пользователя, доступно отдельное руководство, которое описывает различные модули ушных вкладышей, доступные для Вашего СА: «Модули ушных вкладышей для заушных слуховых аппаратов Widex (BTE) «.



Данная брошюра и руководство "Модули ушных вкладышей для слуховых аппаратов Widex (ВТЕ)" содержат важную информацию и инструкции. Внимательно прочитайте буклет перед тем, как начать использовать слуховой аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш слуховой аппарат, модуль ушного вкладыша и аксессуары могут отличаться от рисунков, приведенных в данной инструкции. Кроме этого, мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения.

Использование по назначению

Слуховые аппараты CLEAR - устройства для усиления воздушной проводимости, предназначенные для ежедневного использования во всех акустических ситуациях. В слуховых аппаратах CLEAR может быть установлена программа Zen, которая создает успокаивающий звуковой фон (музыка/шум) для тех людей, которые хотят послушать такие звуки в тишине.

Показания к использованию

Слуховые аппараты рекомендуется использовать людям с различной степенью нарушения слуха, от небольшой (16 дБ HL - 25 дБ HL) до тяжелой/глубокой (90+ дБ HL) и с различными конфигурациями потери слуха.

Эти слуховые аппараты должны быть назначены профессионалами в области слухопротезирования (специалистами-аудиологами, слухопротезистами, отоларингологами), которые получили образование в области реабилитации слуха и тиннитуса.

Описание устройства

Слуховой аппарат CLEAR™ поставляется с модулем ушного вкладыша, состоящим из провода и ушного вкладыша с ресивером. Слуховой аппарат использует беспроводную технологию WidexLink, чтобы обеспечивалось сообщение между левым и правым CA и между CA и устройствами DEX.

В Вашем слуховом аппарате дополнительно может быть установлена программа Zen. Она генерирует фоновые музыкальные тоны (иногда шум). Тоны моделируются в соответствии с Вашим нарушением слуха.



Распознавание правого/ левого аппарата

Стрелка указывает на расположение отличительной метки (красная метка = правый, синяя метка = левый).

Звуковые предупреждения

Слуховой аппарат можно настроить таким образом, чтобы о включении какой-либо функции сообщал определенный сигнал. Сигналы могут быть в голосовой или звуковой форме. Специалист поможет Вам выбрать предпочтительный вариант. Вы также можете полностью отключить функцию сигналов.

Регулировка громкости (через пульт ДУ)		Тон*	Откл.
Нажатие программной кнопки		Щелчок	Откл.
Переключение программ	Сообщ.	Тоны	Откл.
Включение слухового аппарата	Сообщ.	Тон	Откл.
Предупреждение о разряде батарейки	Сообщ.	4 тона	Откл.
Предупреждение о прерывании связи	Сообщ.		Откл.
Напоминание о сервисном обслуживании	Сообщ.		Откл.

^{*} стандартная установка выделена жирным шрифтом

Батарейка

Мы рекомендуем использовать **воздушно-цинковые батарейки.** Для Вашего слухового аппарата следует использовать **тип 312.**

Для приобретения запасных батареек обратитесь к Вашему специалисту по слуховым аппаратам. Пожалуйста, обратите внимание на дату срока годности, а также на рекомендации по утилизации разряженных батареек, указанные на упаковке батареек. В противном случае существует риск, что срок службы батарейки будет короче.



Установка батарейки

Перед тем как поместить батарейку в слуховой аппарат, снимите с нее защитную наклейку. После снятия защитной наклейки батарейка начнет работать через несколько минут.




Не используйте батарейки, на которых остались следы клея или другого вещества, так как они могут мешать работе CA.




С помощью зацепа для ногтя аккуратно откройте крышку батарейного отсека. Не выводите батарейный отсек в запредельное положение.

Батарейку необходимо разместить в батарейный отсек так, чтобы небольшой знак «+» на ней был обращен вверх. Используя батарейный магнит, Вы можете облегчить установку батарейки.

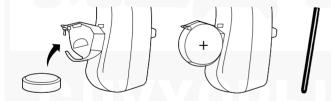

Если батарейка вставлена правильно, батарейный отсек закрывается без усилий.

При замене батарейки держите слуховой аппарат над столом.

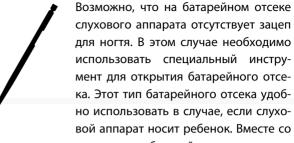

слуховым аппаратом с таким батарейным отсеком поставляется инструмент для его открытия.



Батарейный отсек открывается, как по-казано на рисунке.

Предупреждение о разряде батарейки

При низком заряде батарейки Вы услышите предупреждение, если данная функция не отключена (см. стр. 8). Мы рекомендуем Вам всегда брать с собой запасную батарейку.



ВНИМАНИЕ

Никогда не оставляйте разряженную батарейку в слуховом аппарате. Такая батарейка может потечь и повредить Ваш слуховой аппарат.



ВНИМАНИЕ

Слуховой аппарат может перестать работать, например, если батарейка разрядилась. Нельзя исключать такую возможность, особенно если Вы находитесь на улице или в ситуациях, где возможно использование предупреждающих сигналов.

Включение и выключение слухового аппарата

Батарейный отсек слухового аппарата совмещает функции переключателя Вкл./Выкл. (on/off).



Для включения слухового аппарата закройте батарейный отсек. При включении слухового аппарата Вы услышите сигнал, если данная функция включена.



Выключите CA, аккуратно откройте батарейный отсек. Вы должны услышать щелчок.

Не забудьте выключить слуховой аппарат, когда Вы не пользуетесь им. Если Вы предполагаете, что не будете длительное время использовать слуховой аппарат, достаньте из него батарейку.

Регулировка громкости

Слуховой аппарат автоматически регулирует громкость в соответствии со звуковым окружением.

Если у Вас есть пульт ДУ, Вы можете вручную отрегулировать громкость СА или отключить звук полностью. Все индивидуальные регулировки громкости будут потеряны при выключении слухового аппарата или выборе другой программы.

При установке по умолчанию, любые регулировки громкости распространяются на оба слуховых аппарата.

Чтобы выбрать шаги регулирования громкости, проконсультируйтесь сначала со своим специалистом по слуховым аппаратам.

Если Вы приобрели пульт ДУ, обратитесь к инструкции по его эксплуатации.

Осторожно

Ваш слуховой аппарат является мощным устройством. Не следует носить его на протяжении длительного периода времени при высоком уровне громкости, так как это может повредить Ваш слух.

14



ВНИМАНИЕ

Если слуховой аппарат всегда работает слишком громко или слишком тихо, или если воспроизводимые звуки искажены, обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам за дополнительной информацией.

Чтобы отключить звук в СА:

Нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости на пульте ДУ, пока не услышите долгий сигнал. Коротким нажатием одной из клавиш регулирования громкости Вы можете вернуть звук обратно.

предупреждение о прерывании связи

(Примечание: действительно только в случае, если Ваш специалист включил эту функцию).

Если один из слуховых аппаратов спадет с уха и/или батарейка разрядилась, речевое сообщение или звуковой сигнал два раза известит Вас об этом через другой слуховой аппарат, и светодиоды на обоих аппаратах начнут мигать.

Как только батарейка будет заменена или слуховой аппарат будет снова надет, диод выключится.

Программы прослушивания

В Вашем СА может быть установлено четыре различные программы, помимо этого можно добавить программу Zen+ или Phone+

Главная	Стандартная программа
Музыка	Предназначена для прослушивания музыки
ТВ	Предназначена для просмотра телевизора
Комфорт	Подавляет фоновый шум
Обратный фокус	Фокусируется на звуках, поступающих сзади
Расширитель Диапазона Слышимости	Обеспечивает слышимость высокочастотных звуков
Телефон	Для разговора по телефону
	При выборе данной программы Вы будете слышать звуки, поступающие через телефонную катушку (Т), а не через микрофоны слухового аппарата (М). Этот режим используется в случаях, когда работает система индуктивной связи, например, при разговоре по телефону. Программа телефонной катушки позволяет Вам прослушивать желаемые
	звуки, одновременно подавляя окружающие звуки.
M+T:	При выборе данной программы Вы будете слышать звуки, поступающие в микрофон слухового аппарата (М), а также сигналы, поступающие в телефонную катушку слухового аппарата (Т).
	Обратный фокус Расширитель Диапазона

□ Zen	Генерирует различные тоны Доступна одна тема
Комбинированные программы □ □	Главная программа - в одном слуховом аппарате и программа Zen, Расширитель Диапазона слышимости, Т, МТ, Обратный Фокус или Телефон - в другом
□ Zen+	Специальная программа с тремя темами Zen
☐ Phone+	Только при использовании телефона. Передает телефонный сигнал, полученный одним СА, в другой СА. Микрофоны слухового аппарата, в который передается звук, отключены.

Через некоторое время можно внести изменения в комбинацию программ, если в этом возникнет необходимость.

Программу Zen можно использовать вместе с микрофоном слухового аппарата так, чтобы Вы слышали как окружающие звуки, так и тоны Zen. Или Вы можете использовать программу отдельно в ситуациях, когда у Вас нет необходимости слышать окружающие звуки.

Ваш специалист поможет Вам выбрать предпочтительную продолжительность тонов Zen.

Преимущества

Программа Zen моет создавать релаксирующий звуковой фон. Если программа Zen используется при тиннитусе, то пользователь может почувствовать, уменьшение шума в ушах.



ВНИМАНИЕ

Использование различных программ Zen может повлиять на способность слышать окружающие звуки, включая речь. Не следует использовать данные программы в ситуациях, когда важно слышать эти звуки. В таких ситуациях следует выбрать другую программу.



ВНИМАНИЕ

Если Вы чувствуете, что громкость стала ниже, восприятие звуков стало хуже, речь - менее четкой, шум в ушах усилился, обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам.



ВНИМАНИЕ

При выборе программы Phone+ в качестве программы прослушивания, помните, что в некоторых звуковых ситуациях особенно важно слышать окружающие звуки.

Выбор программ прослушивания

Каждый раз при выборе другой программы Вы будете слышать звуковое предупреждение, если данная функция не отключена.

Программа 1: Речевое сообщение или один короткий звуковой сигнал

Программа 2: Речевое сообщение или два коротких звуковых сигнала

Программа 3: Речевое сообщение или три коротких звуковых сигнала

Программа 4: Речевое сообщение или один долгий и один короткий звуковой сигнал

 Zen+:
 Речевое сообщение или тон или

 Phone+:
 Речевое сообщение или тон

При установке по умолчанию любое переключение программ распространяется на оба слуховых аппарата.

Zen+

Данная программа активируется долгим нажатием (2 секунды) программной кнопки на CA или на RC-DEX. С помощью коротких нажатий Вы можете переключаться между доступными темами Zen.


Для отключения Zen+ нажмите и удерживайте программную кнопку 2 секунды.

Phone+

Данная программа активируется долгим нажатием (2 секунды) программной кнопки на CA.

Для отключения Phone+ нажмите и удерживайте программную кнопку 2 секунды.

При желании отключить функцию программной кноп-ки обратитесь к специалисту, который настраивал Вам слуховой аппарат.

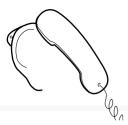

Разговор по телефону


При разговоре по телефону мы рекомендуем Вам держать трубку телефона под наклоном чуть выше уха, а не прислонять к нему. Если звук не оптимален, попробуйте переместить громкоговоритель телефона в немного другое положение.

22

Как расположить слуховой аппарата в ухе

Вставьте ушной вкладыш в слуховой проход, придерживая его за нижнюю часть трубки. Другой рукой можно оттянуть ушную раковину вверх и назад.

Поместите слуховой аппарат за ухо так, чтобы он и провод удобно расположились на ухе как можно ближе к голове.

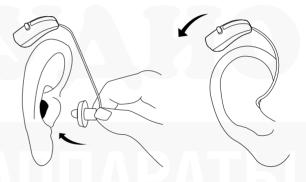


На рисунках показан открытый вкладыш. Чтобы получить более подробную информацию о типах ушных вкладышей, обратитесь к руководству по использованию ушных вкладышей.

Извлечение слухового аппарата из уха

Снимите аппарат с уха.


Аккуратно удалите ушной вкладыш из слухового прохода, придерживая нижнюю часть провода. Если ушной вкладыш имеет специальную леску для удаления, возьмитесь за нее и аккуратно потяните, чтобы вытащить ушной вкладыш.

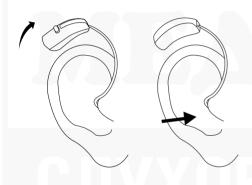

Чистка

Для чистки Вашего слухового аппарата и модуля ушного вкладыша необходимы следующие инструменты.* Обратитесь к руководству пользователя «Модули ушных вкладышей для заушных слуховых аппаратов Widex (BTE)»

- 1 Салфетка
- 2 Длинный инструмент для удаления ушной серы
- 3 Короткий инструмент для удаления ушной серы
- 4 Щеточка

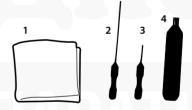

Обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам, если Вы желаете приобрести дополнительные аксессуары для чистки.

^{*} В зависимости от модуля ушного вкладыша.



После использования слухового аппарата протрите его салфеткой.



Никогда не используйте воду или чистящие средства для чистки слухового аппарата, так как это может его повредить.



Когда Вы не используете слуховой аппарат, следует оставлять батарейный отсек открытым, чтобы слуховой аппарат проветривался.

АКСЕССУАРЫ

Для Вашего слухового аппарата доступны различные вспомогательные устройства.

- RC-DEX
- TV-DEX
- M-DEX

Вы можете проконсультироваться со специалистом о необходимости приобретения пульта дистанционного управления или других вспомогательных устройств.

27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Далее приведены рекомендации, которыми Вы можете воспользоваться в случае возникновения неисправностей СА. Если не получается самостоятельно устранить проблему, обратитесь к Вашему специалисту.

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат молчит	Слуховой аппарат не включен	Убедитесь в том, что батарейный отсек плотно закрыт
	Трубка с проводом сломана	Обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам
	Батарейка разрядилась или не работает	Установите новую батарейку в слуховой аппарат
	Заблокирован серный фильтр	Замените серный фильтр. Обратитесь к Руководству по использованию модуля ушного вкладыша.

		T
Проблема	Возможная причина	Решение
Недоста- точная громкость	Батарейка почти разрядилась	Установите новую батарейку в слуховой аппарат
слухового аппарата	Заблокирован серный фильтр	Замените серный фильтр. Обратитесь к Руководству по использованию модуля ушного вкладыша.
	Ваше ухо заблокирова- но ушной серой	Обратитесь к специа- листу/врачу
	Изменилось состояние слуха	Обратитесь к специа- листу по слуховым ап- паратам
Слуховой аппарат	Ваше ухо заблокирова- но ушной серой	Обратитесь к специа- листу/врачу
СВИСТИТ	Трубка с проводом по- желтела и деформиро- валась	Обратитесь к специа- листу по слуховым ап- паратам
	Ушной вкладыш неправильно вставлен в ухо	Вытащите ушной вкладыш из уха и вставьте его заново
	Ушной вкладыш слиш- ком свободно размеща- ется в ухе	Обратитесь к специа- листу по слуховым ап- паратам
	Ресивер недостаточно плотно вставлен в уш-	Стандартный ушной вкладыш Замените уш-
	ной вкладыш	ной вкладыш. Если это не решит проблему, обратитесь к Вашему специалисту. Индивидуальный ушной вкладыш: Обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам

Проблема	Возможная причина	Решение
Два слухо- вых аппара- та не рабо- тают синх- ронно	Прервана связь между слуховыми аппаратами	Выключите и повторно включите слуховые ап- параты
Слуховые	а. RC-DEX находится за	а. Расположите RC-DEX
аппараты не реагируют на изме- нения гром- кости или переключе- ние про- граммы на RC-DEX	пределами радиуса действия (> 1 м) б. По близости наблюдается сильное электромагнитное вмешательство в. Отсутствует совместимость между RCDEX и CLEAR	ближе к CLEAR б. Выйдите из поля электро-магнитного воздействия в. Обратитесь к Вашему дилеру, чтобы узнать совместим ли RC-DEX с CLEAR.
Пользователь слы- шит неров- ную речь (с перерыва- ми) через слуховые аппараты или не слы- шит речь от передаю- щего уха.	а. В одном из слуховых аппаратов батарейка не работает. б. По близости наблюдается сильное электромагнитное вмешательство	а. Замените батарейку в одном или обоих слуховых аппаратах. б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия

УХОД ЗА СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ

Слуховой аппарат является дорогостоящим электронным устройством, которое требует бережного обращения. Ниже приведены рекомендации, следуя которым, Вы продлите срок службы своего аппарата:



ВНИМАНИ

- Выключайте аппарат, когда не используете его. Если Вы предполагаете, что не будете длительное время использовать слуховой аппарат, достаньте из него батарейку.
- Когда Вы не пользуетесь им, храните его в футляре в прохладном, сухом месте вдали от детей и домашних животных.
- Никогда не подвергайте слуховой аппарат воздействию высокой температуры или влажности. Обязательно просушите слуховой аппарат, если Вы вспотели после долгой физической активности, например, после занятий спорта.
- Не бросайте свой СА, во время чистки СА или замены батарейки держите СА над мягкой поверхностью.
- Снимайте слуховой аппарат, когда идете в душ или бассейн, пользуетесь феном, спреями для тела или кремами, например, солнцезащитным лосьоном.
- В условиях с высокой влажностью Вы можете ежедневно использовать набор Widex для сушки СА для того, чтобы уменьшить количество влаги в слуховом аппарате. Смотрите инструкцию по эксплуатации, которую Вы получите вместе с комплектом для сушки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



осторожно

Слуховые аппараты и батарейки нельзя глотать или использовать ненадлежащим образом, так как это может привести к увечьям или вызвать смерть. В случае проглатывания компонента или батарейки немедленно обратитесь к врачу.

- Храните слуховой аппарат, батарейки и аксессуары вдали от детей, которые могут случайно проглотить их или нанести себе вред. Никогда не меняйте батарейки в их присутствии, и не показывайте, где Вы храните батарейки. Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.
- Батарейки очень маленькие, и их можно принять за таблетки или т.п. Никогда не кладите батарейку или слуховой аппарат в рот и не позволяйте это делать ребенку. Таким образом, Вы исключаете возможность ее проглатывания.



ВНИМАНИЕ

- При использовании батарейки неправильного типа или ее перезарядке она может взорваться. Всегда следуйте инструкциям по утилизации батареек.
- Никогда не разрешайте другим людям пользоваться Вашим слуховым аппаратом, так как это может повредить их слух навсегда.
- При выборе программ помните, что в определенных звуковых обстановках особенно важно слышать окружающие звуки (дорожное движение, сигналы предупреждения и т.д.).
- Ваши слуховые аппараты изготовлены из современных материалов, не вызывающих аллергию. Однако в редких случаях может возникнуть кожное раздражение. Если Вы заметили раздражение кожи внутри, вокруг уха или в ушном канале, обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ

- Обратите внимание на то, что использование любого типа слухового аппарата в некоторой степени повышает риск появления инфекций в ушном канале. Инфекция может появиться в результате недостаточной вентиляции уха. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам всегда снимать слуховой аппарат и ушной вкладыш на ночь, чтобы ушной канал проветривался. Также очень важно ежедневно проверять и чистить слуховой аппарат/модуль ушного вкладыша. В случае появления инфекции обратитесь к врачу, а также к специалисту по слуховым аппаратам для того, чтобы он продемонстрировал Вам процедуру дезинфекции слухового аппарата и компонентов модуля ушного вкладыша. Никогда не очищайте слуховой аппарат спиртом, хлорсодержащими или подобными веществами.
- Слуховые аппараты производства компании Widex не сертифицированы для использования в шахтах или других местах, заполненных взрывоопасными газами.



ВНИМАНИЕ

• Снимайте СА, если Вы подвергаетесь радиоактивному облучению, например, рентгеновским лучам, процедуре ядерного магнитного резонанса, компьютерной томографии и т.п. Излучения, возникающие во время этих процедур, а также исходящие от микроволновой печи, могут повредить слуховой аппарат. Тогда как другие типы излучения, например, исходящие от комнатных датчиков слежения, сигнальных устройств или сотовых телефонов не вредят Вашему слуховому аппарату. Однако они могут вызвать помехи.



- Ваш слуховой аппарат отвечает международным стандартам относительно восприимчивости к помехам. Однако нельзя полностью исключать риск возникновения помех от мобильных телефонов, систем сигнализации и т.п.
- Несмотря на то, что слуховой аппарат отвечает самым строгим международным стандартам относительно электромагнитной совместимости, невозможно полностью исключить риск возникновения помех, если пульт используется вблизи, например, медицинского оборудования.
- Никогда не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать слуховой аппарат.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Слуховой аппарат не восстанавливает нормальный слух и не устраняет потерю слуха, вызванную органическими поражениями. Однако слуховой аппарат поможет Вам максимально использовать свой остаточный слух. Также следует помнить, что процесс привыкания к слуховому аппарату и новому звучанию занимает определенное время.
- Только регулярное использование СА позволит Вам получить все преимущества.
- Использование слухового аппарата это только часть процесса по реабилитации слуха, который также должен сопровождаться слуховым тренингом и чтением с губ.
- Использование слухового аппарата повышает риск накопления ушной серы. Обратитесь к своему специалисту/врачу, если возникнет подозрение, что в ухе образовалась серная пробка. Ушная сера не только ухудшает Ваш слух, но и в значительной степени влияет на эффективность работы слухового аппарата. Считается полезным, если врач будет промывать Вам уши несколько раз в год.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION AND INDUSTRY CANADA STATEMENT

FCC ID: TTY-C4FS IC: 5676B-C4FS

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.



Настоящим компания Widex A/S подтверждает, что слуховой аппарат C3-FS отвечает основополагающим требованиям и другим положениям Директивы 1999/5/EC.



Слуховые аппараты, принадлежности и батарейки не следует выбрасывать вместе с хозяйственным мусором. Обратитесь к Вашему местному представительству Widex для того чтобы узнать, как следует утилизировать старые слуховые аппараты.

Копию Заявления о соответствии Вы можете найти на сайте http://www.widex.com:



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЬ

CE 0459

Производитель

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge Denmark • www.widex.com





Printed by HTO / 2011-03 9 514 0177 032 #01