



**Инструкция по
эксплуатации слуховых
аппаратов Inteo**

Заушный слуховой аппарат IN-9é



Ваш слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш élan и аксессуары могут отличаться от тех, которые показаны в данной инструкции по эксплуатации. Кроме этого, мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения.



Слуховые аппараты и принадлежности не следует выбрасывать вместе с хозяйственным мусором. Обратитесь к Вашему местному представительству Widex для того чтобы узнать, куда следует отдавать старые слуховые аппараты.

Содержание

Ваш новый слуховой аппарат Inteo élan	4
Inteo élan (IN-9é)	5
Система открытого ушного вкладыша élan	6
Батарейка	7
Рекомендуемый тип батарейки	7
Установка батарейки	8
Замена батарейки	9
Включение и выключение слухового аппарата	10
Распознавание правого/левого аппарата	11
Как правильно поместить слуховой аппарат Inteo élan в/за ухо ..	12
Возможные установки при включении слухового аппарата	13
Как правильно снять слуховой аппарат Inteo élan с/из уха	14
Автоматическая регулировка громкости	15
Дополнительная регулировка громкости	16
Программы прослушивания	18
Выбор программ прослушивания	21
Чистка Inteo élan	24
Вспомогательные инструменты для чистки	24
Чистка слухового аппарата	25
Чистка системы открытого ушного вкладыша élan	26
Замена системы открытого ушного вкладыша élan	29
Подгонка системы открытого ушного вкладыша élan	30
Уход за слуховым аппаратом	34
Полезные советы	38
Аксессуары	40
Аудио вход	40
FM системы	44
Пульт дистанционного управления	45
В случае неисправности	46

Ваш новый слуховой аппарат Inteo élan


Спасибо за то, что Вы выбрали слуховой аппарат Widex. Имея слуховой аппарат Inteo élan, Вы можете участвовать в процессе приспособления его звучания к Вашему нарушению слуха, образу жизни и индивидуальным потребностям.

Мы Вам рекомендуем внимательно ознакомиться со всей инструкцией для того, чтобы полностью воспользоваться преимуществами и техническими возможностями, заложенными в Ваш новый слуховой аппарат Inteo élan.

Мы уверены, что Ваш новый слуховой аппарат от Widex станет Вашим надежным помощником на многие годы.


Inteo élan (IN-9é)

1. **Входы микрофона**, через которые звук поступает в слуховой аппарат.
2. **Некоторые модели** Inteo доступны с регулятором громкости. С помощью регулятора громкости можно дополнительно отрегулировать автоматически настроенную громкость.
3. **Программная кнопка**, с помощью которой можно выбрать желаемую программу прослушивания слухового аппарата.
4. **Переключатель Вкл./Выкл. (on/off)**.
5. **Батарейный отсек с зацепом**, упрощающим открытие отсека.
6. **Система открытого ушного вкладыша élan**.

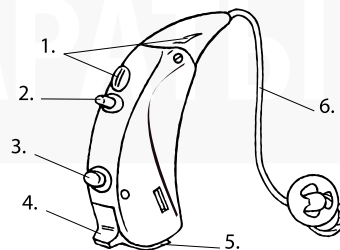

Система открытого ушного вкладыша élan

1. Рожок слухового аппарата
2. Трубочка
3. Фиксатор
4. Открытый ушной вкладыш

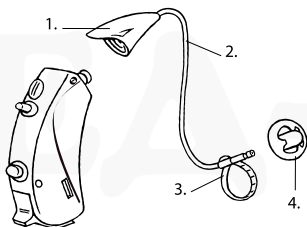

Батарейка

Рекомендуемый тип батарейки

Рекомендуемым типом батарейки для Вашего слухового аппарата Inteo élan является:


Воздушно-цинковая батарейка тип 13

Для приобретения запасных батареек обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов. Пожалуйста, обратите внимание на дату срока годности, а также на рекомендации по утилизации разряженных батареек, указанные на упаковке батареек. Не используйте батарейки, срок годности которых истек. Название «воздушно-цинковая» показывает, что такой батарейке для работы необходим воздух. Поэтому снимайте защитную наклейку только непосредственно перед помещением батарейки в слуховой аппарат. После снятия защитной наклейки батарейка начинает работать по истечении нескольких минут. Период работоспособности батарейки зависит от ряда факторов; например, от установок в Вашем слуховом аппарате, от количества часов использования в день, а также от звукового окружения, в котором Вы носите слуховой аппарат.






Установка батареек

Перед тем, как поместить батарейку в слуховой аппарат, снимите с нее защитную наклейку. Не используйте батарейки, на которых остались следы клея или другого вещества.

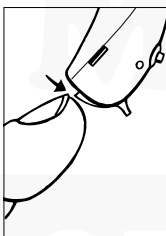

Откройте батарейный отсек слухового аппарата, нажав вверх ногтем на зацеп батарейного отсека. Зацеп расположен в нижней части слухового аппарата - на противоположной стороне от переключателя вкл./выкл. При установке батареек соблюдайте полярность. Знак

«+» батареек должен быть направлен вверх. Если батарейка вставлена правильно, батарейный отсек закрывается без усилий.

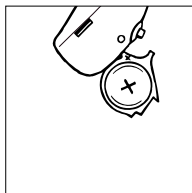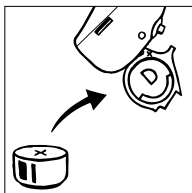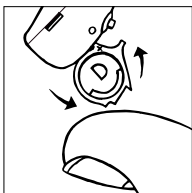


Замена батареек

Если во время пользования аппаратом Вы услышите четыре коротких звуковых сигнала, Вам следует как можно скорее заменить батарейку, поскольку это означает, что батарейка уже практически полностью отслужила свой срок. Как только элемент питания полностью разрядится, слуховой аппарат перестанет работать. Период, в течение которого может использоваться батарейка после четырех коротких сигналов, варьируется. Мы Вам рекомендуем всегда брать с собой запасную батарейку.

Для регулировки уровня громкости звукового сигнала или отключения его функции обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов.


Никогда не оставляйте разряженную батарейку в слуховом аппарате. Такая батарейка может потечь и повредить Ваш слуховой аппарат. Замену батареек в слуховом аппарате всегда производите над столом или в комнате с ковровым покрытием, чтобы слуховой аппарат не повредился в результате падения.

Включение и выключение слухового аппарата

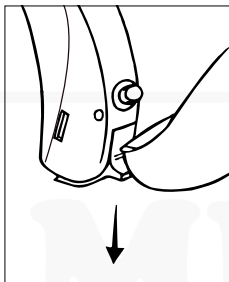

Батарейный отсек расположен в нижней части слухового аппарата. Батарейный отсек совмещает функции переключателя вкл./выкл.


Слуховой аппарат включен, если переключатель сдвинут вперед и выключен, если переключатель передвинут назад.

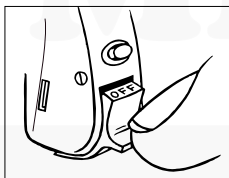

Слово "OFF" отчетливо видно на переключателе, когда слуховой аппарат выключен.

Не забудьте выключить слуховой аппарат, когда Вы не пользуетесь им. Если Вы предполагаете, что не будете длительное время использовать слуховой аппарат, удалите из него батарейку.


Распознавание правого/левого аппарата

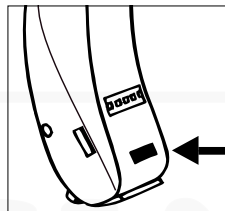

Если Вы носите два слуховых аппарата и хотите убедиться в том, что надеваете их правильно, можно сделать на аппаратах небольшие опознавательные метки, конечно же, обратившись для этого к своему специалисту, у которого Вы настраивали слуховой аппарат (красная метка – правый аппарат, синяя метка – левый аппарат).

Как правильно поместить слуховой аппарат Inteo élan в/за ухо

Вставьте батарейку в слуховой аппарат. Поместите слуховой аппарат за ухо так, чтобы его рожек и трубочка удобно расположились на ухе как можно ближе к голове. Затем вставьте открытый ушной вкладыш в ушной канал, придерживая его за нижнюю часть трубки. Наконец убедитесь в том, что фиксатор расположен правильно. Фиксатор должен опираться о вход ушного канала и поддерживать открытый ушной вкладыш и его трубочку. Не забывайте время от времени проверять, что слуховой аппарат и открытый ушной вкладыш размещены правильно.

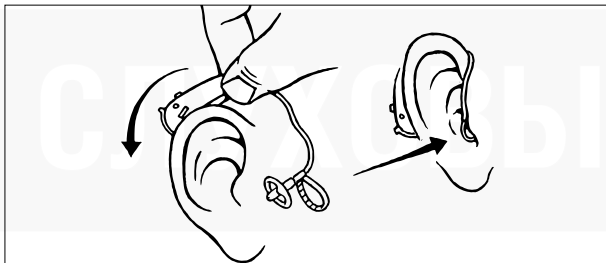

Возможные установки при включении слухового аппарата

При включении Ваш слуховой аппарат может находиться в двух различных режимах включения. При выборе обычного стартового режима слуховой аппарат будет свистеть при вставлении открытого ушного вкладыша в ухо. При выборе альтернативного стартового режима слуховой аппарат будет активно предотвращать возникновение свиста при вставлении открытого ушного вкладыша в ухо. Мы Вам рекомендуем совместно с Вашим специалистом по настройке слуховых аппаратов выбрать стартовый режим, наиболее соответствующий Вашим потребностям.

Как правильно снять слуховой аппарат Inteo élan с/из уха.


Сначала снимите аппарат с уха. Затем аккуратно вытяните открытый ушной вкладыш из ушного канала, придерживая при этом нижнюю часть трубки.

Автоматическая регулировка громкости

Inteo élan автоматически регулирует громкость в соответствии со звуковым окружением. Несколько тысяч раз в секунду слуховой аппарат Inteo élan анализирует акустическое состояние окружающей среды и вносит соответствующие коррективы. Имея слуховой аппарат Inteo élan, Вам не придется думать о настройке громкости – ее регулировка происходит автоматически.

Внимание: Если слуховой аппарат звучит слишком громко или слишком тихо, или если воспроизводимые звуки искажены, обратитесь к специалисту по настройке слуховых аппаратов за дополнительной информацией.

Дополнительная регулировка громкости

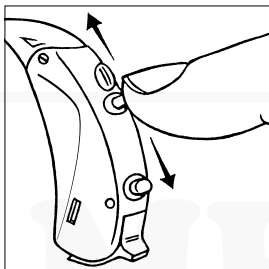

Ваш слуховой аппарат может быть оснащен электронным регулятором громкости в виде рычажка. Нажмите рычажок вверх, чтобы увеличить автоматически настроенную громкость. Нажмите рычажок вниз, чтобы уменьшить громкость.

Для того чтобы немного изменить уровень громкости, используйте короткие нажатия. Для быстрого изменения уровня громкости необходимо удерживать регулятор нажатым в течение нескольких секунд.

При каждом изменении уровня громкости Вы будете слышать звуковой сигнал. Для настройки звукового сигнала или отключения функции регулятора громкости обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов.

Все ручные регулировки автоматически настроенной громкости будут потеряны при выключении слухового аппарата.

Программы прослушивания

Ваш аппарат Inteo élan может быть оснащен различными программами прослушивания (макс. 5), предназначенными для разных звуковых обстановок. Ваш специалист по настройке слуховых аппаратов может помочь Вам выбрать наиболее подходящие программы и сделать их доступными для активации с помощью программной кнопки. Спустя некоторое время можно внести изменения в комбинацию программ, если в этом возникнет необходимость. В этом руководстве Ваш специалист может отметить список программ, внесенных в Ваш слуховой аппарат (см. Стр. 22). Вы можете выбрать между следующими программами:

Главная программа Inteo: Данная программа является стандартной программой слуховых аппаратов Inteo. При выборе главной программы все автоматические функции слухового аппарата обеспечивают слышимость, разборчивость речи и комфорт во всех звуковых обстановках.

Программа для привыкания: Данная программа соответствует главной программе за исключением того, что уровень усиления немного ниже. Эта программа особенно удобна для новичков, которые желают постепенно привыкать к новым звукам.

Музыка: Данная программа специально предназначена для прослушивания музыки.


ТВ: Данная программа специально предназначена для просмотра телевизора.

Комфорт: Данная программа оптимизирует комфорт звучания как в шумных, так и в тихих обстановках.

Расширитель Диапазона Слышимости: Данная программа оптимизирует слышимость высокочастотных звуков. При использовании данной программы высокочастотные звуки перемещаются в диапазон слышимых, низкочастотных звуков.

М+Т: При выборе данной программы Вы будете слышать звуки, поступающие в микрофон слухового аппарата (М), а также звуки, поступающие в телефонную катушку слухового аппарата (Т). Данная программа позволяет Вам слушать желаемый источник звука, и одновременно слышать окружающие звуки.

Т: При выборе данной программы Вы будете слышать звуки, поступающие в телефонную катушку слухового аппарата (Т). Звуки, поступающие в микрофон слухового аппарата (М), не будут слышны. Этот режим доступен только в случаях, когда работает система индуктивной связи, например, при разговоре по телефону. Данная программа позволяет Вам слушать желаемый источник звука, одновременно подавляя окружающие звуки.

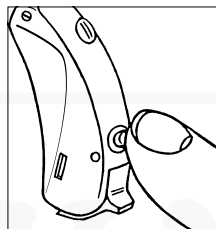

Выбор программ прослушивания

Для выбора желаемой программы прослушивания нажмите программную кнопку, расположенную с тыльной стороны слухового аппарата.

Если Вы не желаете использовать программную кнопку, обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов для того, чтобы он отключил ее функцию.

Каждый раз, переключая программу, Вы будете слышать звуковой сигнал. Звуковые сигналы говорят о том, какая программа выбрана:

- Программа № 1: Один короткий звуковой сигнал
- Программа № 2: Два коротких звуковых сигнала
- Программа № 3: Три коротких звуковых сигнала
- Программа № 4: Один длительный и один короткий звуковой сигнал
- Программа № 5: Один длительный и два коротких звуковых сигнала

Число различных звуковых сигналов зависит от числа программ прослушивания, которое Вы со специалистом по настройке слуховых аппаратов выбрали для Вашего слухового аппарата. Выбранные программы обозначены цифрами от 1 до 5.

Если, посоветовавшись со своим специалистом, Вы решите, что более полезной будет иная комбинация программ, эту последовательность Вы можете записать на пустом бланке, приведенном в конце этого руководства.

Программы прослушивания


Программа	Выбранные программы:	Применение:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Чистка Inteo élan


Вспомогательные инструменты для чистки

Для Вашего слухового аппарата подходят следующие вспомогательные инструменты:

1. **Батарейный магнит**, упрощающий установку батарейки в батарейный отсек.
2. **Инструмент для удаления ушной серы**, для очистки системы открытого ушного вкладыша élan.
3. **Мягкая ткань**, для просушки и очистки слухового аппарата.

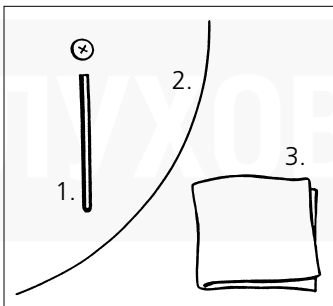

Обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов, если Вы желаете приобрести дополнительные вспомогательные аксессуары.

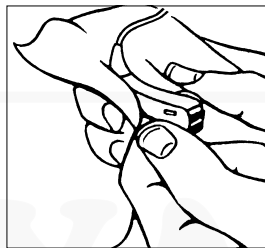



Чистка слухового аппарата

Никогда не мойте слуховой аппарат водой, чистящими растворами или другими жидкостями. Вместо этого, каждый день протирайте слуховой аппарат мягкой сухой тканью.

Когда аппарат не используется, оставляйте на некоторое время батарейный отсек открытым, чтобы проветрить и просушить слуховой аппарат изнутри.



Чистка системы открытого ушного вкладыша élan

Проверьте, что открытый ушной вкладыш чистый и не засорен ушной серой или влагой. Никогда не используйте спирт или чистящие растворы для чистки открытого ушного вкладыша. Если трубочка открытого ушного вкладыша потеряла эластичность, стала жесткой, желтой или растрескалась, ее следует заменить. Это также касается других деталей системы открытого ушного вкладыша. Обратитесь к специалисту по настройке слуховых аппаратов для того, чтобы приобрести новые трубочки и другие детали.

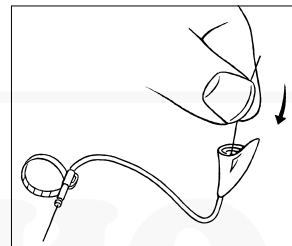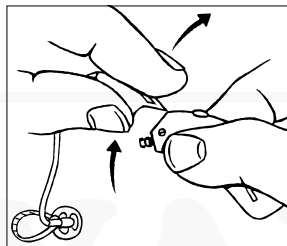

Если трубочка открытого ушного вкладыша заблокирована, ее следует очистить. Держите рожок слухового аппарата двумя пальцами, одновременно придерживая слуховой аппарат противоположной рукой. Отсоедините систему открытого ушного вкладыша, наклонив его и вытянув его назад. Затем очистите входное отверстие с помощью инструмента для удаления ушной серы.



Замена системы открытого ушного вкладыша élan

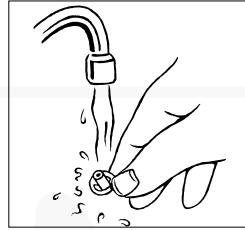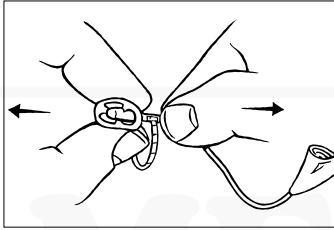

При необходимости промойте открытый ушной вкладыш в теплой воде. Отсоедините открытый ушной вкладыш от трубочки и тщательно очистите его. Оставляйте его сохнуть в течение ночи.

Прежде чем снова начать использование системы открытого ушного вкладыша élan убедитесь в том, что она чистая и сухая.

Следует заменять систему открытого ушного вкладыша время от времени. Срок службы системы открытого ушного вкладыша élan варьируется в зависимости от некоторых факторов как, например, количество часов использования слухового аппарата в день и характера ушной серы пользователя. Вы можете отсоединить систему открытого ушного вкладыша, придерживая рожок двумя пальцами и одновременно придерживая слуховой аппарат противоположной рукой. Затем отсоедините систему открытого ушного вкладыша, наклонив его и вытянув его назад. Важно вытянуть систему открытого ушного вкладыша назад, как описано в данной инструкции. Вы можете установить новую систему открытого ушного вкладыша, осторожно вдавив ее в слуховой аппарат. Крайне важно всегда проверять, что система открытого ушного вкладыша плотно установлена.

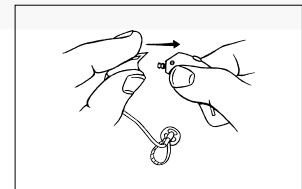
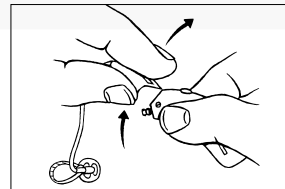


Прежде чем надеть слуховой аппарат, необходимо подогнать систему открытого ушного вкладыша élan к Вашему уху. Без определенного опыта и соответствующих инструментов достаточно трудно осуществить необходимые подправки. Поэтому мы Вам рекомендуем обратиться к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов для того, чтобы он показал Вам процедуру подправки и сообщил, где можно приобрести запасные системы.


Подгонка системы открытого ушного вкладыша élan

Вы можете подогнать систему открытого ушного вкладыша élan к Вашему уху. Сначала Ваш специалист по настройке слуховых аппаратов подберет Вам правильный размер. Специалист по настройке слуховых аппаратов может отметить выбранный размер в данной инструкции по эксплуатации (см. Стр. 31).



Выбор трубки: Трубки доступны в пяти различных длинах для правого и левого уха. Важно подобрать соответствующую длину для того, чтобы обеспечить удачную и комфортную подгонку. Трубка не должна быть дискомфортно короткой. С другой стороны, она не должна быть слишком длинной и болтаться на ухе.

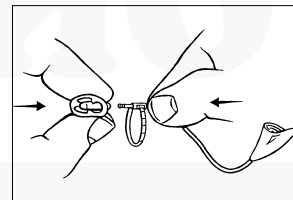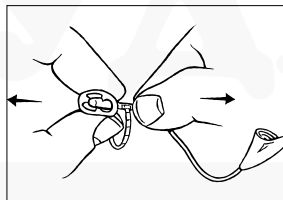

Выбор ушной вкладыша élan. Открытые ушные вкладыши élan доступны в четырех размерах. Важно подобрать соответствующий размер для того, чтобы обеспечить удачную и комфортную подгонку. Открытый ушной вкладыш должен комфортно разместиться в ушном канале. Вы можете заменить открытый ушной вкладыш élan, отсоединив его от трубочки. Затем установите новый ушной вкладыш на трубочку. Крайне важно всегда проверять, что открытый ушной вкладыш плотно установлен.

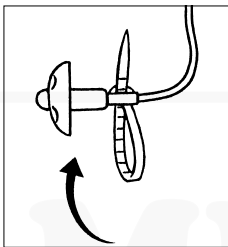

Подправка фиксатора: Фиксатор должен иметь соответствующий размер и форму петли для того, чтобы обеспечить комфорт при поддержке открытого ушного вкладыша в ушном канале. Для регулировки размера и формы фиксатора протяните его конец через небольшое отверстие на стороне трубочки открытого ушного вкладыша élan.

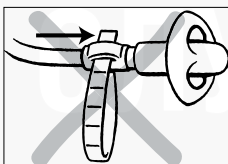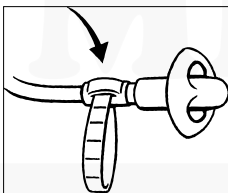

Когда будет иметь необходимый размер, отрежьте лишнюю часть материала, оставив только петлю. Важно отрезать всю лишнюю часть фиксатора для того, чтобы конец петли совпадал с отверстием, и не было острых краев. Проведите пальцем и убедитесь в том, что нет никаких острых краев. Если конец фиксатора чувствуется в отверстии, то есть поверхность не ровная, может возникнуть раздражение кожи.

верстием, и не было острых краев. Проведите пальцем и убедитесь в том, что нет никаких острых краев. Если конец фиксатора чувствуется в отверстии, то есть поверхность не ровная, может возникнуть раздражение кожи.

Когда фиксатор имеет соответствующий размер и форму петли, он комфортно поддерживает открытый ушной вкладыш в ушном канале.


Отметьте выбранные размеры элементов системы открытого ушного вкладыша élan.

Левое ухо		Правое ухо			
Открытый ушной вкладыш		Трубочка	Открытый ушной вкладыш		Трубочка
1S	1L	1L	1S	1L	1R
2S	2L	2L	2S	2L	2R
		3L			3R
		4L			4R
		5L			5R

Уход за слуховым аппаратом



При надлежащем уходе Ваш слуховой аппарат надежно послужит Вам долгое время. Ниже приведены рекомендации, следуя которым, Вы продлите срок службы своего аппарата:

- Для сохранения правильной формы системы открытого ушного вкладыша élan будьте осторожны, не изгибайте и не сжимайте ее, когда Вы кладете слуховой аппарат Inteo élan в коробку для хранения.

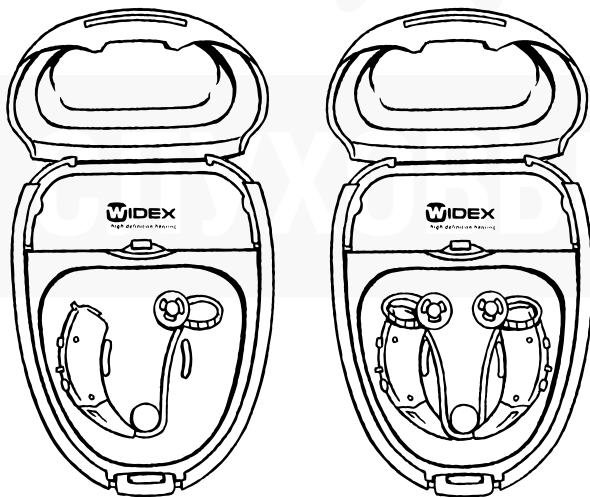

34

- Берегите аппарат, как зеницу ока. Храните его в футляре в прохладном, сухом месте вдали от детей и домашних животных.
- Не забывайте протирать открытый ушной вкладыш и трубочку чистой, сухой тканью для того, чтобы не накопилась ушная сера. В противном случае ушной вкладыш может отсоединиться.
- Если трубочка открытого ушного вкладыша потеряла эластичность, стала жесткой, желтой или растрескалась, ее следует заменить. Это также касается других деталей системы открытого ушного вкладыша. Обратитесь к специалисту по настройке слуховых аппаратов для того, чтобы приобрести новые трубочки и другие детали.
- Выключайте аппарат, когда не используете его. Если Вы не собираетесь носить аппарат день или больше, вынимайте из него батарейку, чтобы она не потекла.

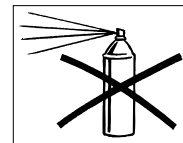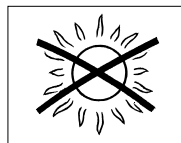

35

-
- Никогда не подвергайте аппарат воздействию высокой температуры или влажности.
 - В обстановках с высокой влажностью Вы можете ежедневно использовать осушающий комплект от Widex для того, чтобы уменьшить количество влаги в слуховом аппарате. Смотрите инструкцию по эксплуатации, которую Вы получите вместе с осушающим комплектом.
 - Снимайте слуховой аппарат, когда идете в душ или бассейн, пользуетесь феном, лаком для волос или другими распылителями.
 - Никогда не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать слуховой аппарат.

-
- Снимайте аппарат, принимая процедуры коротковолновой терапии, рентгеновского облучения, магнитно-резонансной или компьютерной томографии и т.д., и никогда не кладите слуховой аппарат в микроволновую печь. Эти (и другие) типы излучения могут повредить Ваш слуховой аппарат. Тогда как другие типы излучения, например, исходящие от комнатных датчиков слежения, сигнальных устройств или сотовых телефонов не вредят Вашему слуховому аппарату.
 - Слуховые аппараты производства компании Widex не сертифицированы для использования в шахтах или других местах, заполненных взрывоопасными газами.

Полезные советы

- Использование слухового аппарата повышает риск накопления ушной серы. Обратитесь к своему специалисту по слуху/врачу, если возникнет подозрение, что в ухе образовалась серная пробка. Ушная сера не только ухудшает Ваш слух, но и в значительной степени влияет на эффективность слухового аппарата. Хорошо, если врач будет промывать Вам уши несколько раз в год.
- Следите за тем, чтобы слуховой аппарат и вспомогательные принадлежности находились вдали от детей, которые могут случайно проглотить их. Храните батарейки вдали от детей, и сразу выбрасывайте использованные батарейки. Никогда не производите замену батареек перед детьми, и не показывайте, где Вы храните их.
- Никогда не кладите батарейку в рот и не позволяйте это делать ребенку. Таким образом, Вы исключаете риск ее проглотить. В случае глотания батарейки Вами или ребенком, немедленно обратитесь к врачу.
- Ваши слуховые аппараты изготовлены из современных материалов, не вызывающих аллергии. Тем не менее, в редких случаях может воз-

никнуть некоторое кожное раздражение. Если Вы заметили раздражение кожи внутри или вокруг уха или в ушном канале, обратитесь к врачу.

- Пожалуйста, обратите внимание на то, что использование любого типа слухового аппарата/открытого ушного вкладыша немного повышает риск появления инфекций в ушном канале. Инфекция может появиться в результате недостаточной вентиляции уха. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам всегда снимать слуховой аппарат/открытый ушной вкладыш на ночь, чтобы проветривать ушной канал. Также очень важно ежедневно проверять и чистить слуховой аппарат/открытый ушной вкладыш. В случае появления инфекции протирайте слуховой аппарат/открытый ушной вкладыш дезинфицирующей салфеткой и посоветуйтесь с врачом. Обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов за более подробной информацией о дезинфекции слухового аппарата. Никогда не используйте спирт, хлор или подобные вещества для чистки слухового аппарата или открытого ушного вкладыша.

Аксессуары

Аудио вход

Ваш слуховой аппарат Inteo может быть оснащен аудио адаптером. С помощью аудио адаптера аппарат подключается к различным устройствам (FM-системы и CROS/BI-CROS), а также к аудио оборудованию (радио, ТВ и т.д.). Таким образом, звук от радио или другого устройства, оснащенного FM микрофоном, поступает непосредственно в слуховой аппарат.

При подключении к слуховому аппарату аудио адаптера стандартные программы прослушивания могут быть заменены специальными аудио программами.

В нижеприведенной таблице Ваш специалист по настройке слуховых аппаратов может отметить доступные аудио программы и их последовательность. При подключении к слуховому аппарату аудио адаптера аппарат автоматически переключается на аудио программу. Если потом Вы желаете переключиться на другую программу, нажмите на программную кнопку слухового аппарата. Обычная последовательность программ восстанавливается сразу после отсоединения аудио адаптера (см. стр. 22).

Программа	Последовательность программ при подключении аудио адаптера
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Внимание: Если слуховой аппарат подключен к оборудованию, которое питается от сети, необходимо проверить, что это оборудование удовлетворяет требованиям безопасности, указанным в международном стандарте IEC 60065.

Не подключайте слуховой аппарат к разъемам, которые обозначены одним из приведенных ниже символов:



За более подробной информацией об использовании аудио оборудования обратитесь к Вашему специалисту по настройке слуховых аппаратов.

FM системы

FM система – это вспомогательное устройство, которое совместимо со слуховыми аппаратами Inteo. FM устройство облегчает понимание речи в сложной звуковой ситуации. FM система от Widex называется SCOLA.

FM-устройство состоит из маленького радиопередатчика с микрофоном, помещенным рядом с говорящим, и маленького радиоприемника, прикрепляемого к аппарату Inteo с помощью FM адаптера. Система может использоваться на расстоянии до 15 метров в зависимости от звуковой обстановки. Так как система SCOLA является беспроводной, оба участника – говорящий, и слушатель – обладают полной свободой передвижения на довольно большой территории.

Ваш специалист по настройке слуховых аппаратов может посоветовать Вам – стоит ли Вам приобрести FM-систему.

Пульт дистанционного управления

- альтернативный способ управления функциями слухового аппарата

С Вашим слуховым аппаратом совместим пульт дистанционного управления. Вы можете управлять функциями слухового аппарата без пульта, но при его использовании у Вас есть ряд дополнительных опций. Ваш специалист по настройке слуховых аппаратов может посоветовать Вам – стоит ли Вам приобретать пульт дистанционного управления.

В случае неисправности

На следующих страницах приведено несколько советов, которыми можно воспользоваться в случае возникновения проблем со слуховым аппаратом. Прежде чем обратиться к специалисту по сервисному обслуживанию слуховых аппаратов, воспользуйтесь приведенными ниже советами:

Если звук слухового аппарата отсутствует, причиной может быть:

- *Слуховой аппарат не включен.* Проверьте, что батарейный отсек, который совмещает функцию переключателя Вкл./Выкл. полностью выдвинут вперед, так, чтобы на переключателе не было видно надписи «OFF».
- *Батарейка разрядилась или не работает.* Вставьте новую батарейку. Убедитесь в том, что батарейка вставлена правильно, и крышечка батарейного отсека закрыта правильно.
- *Заблокировано звуковое отверстие открытого ушного вкладыша.* Блокировка звукового отверстия открытого ушного вкладыша часто связана с накоплением ушной серы. Очистите заблокированное звуковое отверстие или замените открытый ушной вкладыш. При необходимости замените всю систему открытого ушного вкладыша.

Если слуховой аппарат работает не на полную мощность, причиной может быть:

- *Батарейка почти разрядилась.* Вставьте новую батарейку. Убедитесь в том, что батарейка вставлена правильно, и крышечка батарейного отсека закрыта правильно.
- *Заблокировано звуковое отверстие открытого ушного вкладыша.* Блокировка звукового отверстия открытого ушного вкладыша часто связана с накоплением ушной серы. Очистите заблокированное звуковое отверстие или замените открытый ушной вкладыш. При необходимости замените всю систему открытого ушного вкладыша.
- *Ваше ухо заблокировано ушной серой.* Обратитесь к Вашему специалисту по слуху/врачу.
- *Изменилось состояние слуха.* Обратитесь к специалисту по настройке слуховых аппаратов.

Если слуховой аппарат непрерывно свистит, причиной может быть:

- *Ваше ухо заблокировано ушной серой.* Обратитесь к Вашему специалисту по слуху/врачу.
- *Трубка сломана.* Замените систему открытого вкладыша élan.
- *Трубка пожелтела и стала жесткой.* Замените систему открытого вкладыша élan.

Если слуховой аппарат работает прерывисто, причиной может быть:

- *Переключатель Вкл./Выкл. загрязнился.* Подвигайте пару раз переключатель вперед и назад.

Выбранные программы прослушивания

Программа	Выбранные программы:	Применение:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Выбранные программы прослушивания

Программа	Выбранные программы:	Применение:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

CE 0459

Widex, DK-3500 Vaerloese
Denmark · www.widex.com



Printed by FB / 07-06
9 514 0070 032 #01